

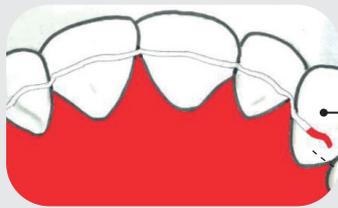
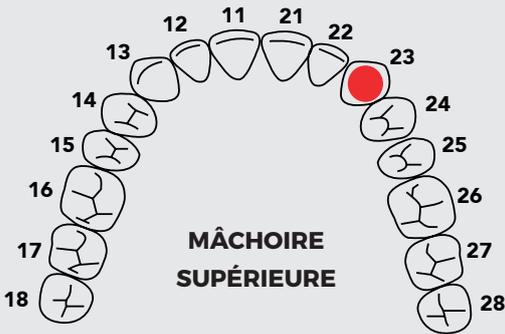


PROTOCOLE DE COLLAGE DIRECT SMILERS® FIL

REPÈRES DE COULEUR SUR LES FILS AU NIVEAU DE 23 ET 33

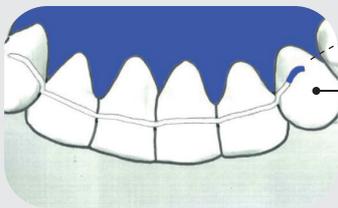

VUE ENDO-BUCCALE
AVEC FIL MAXILLAIRE

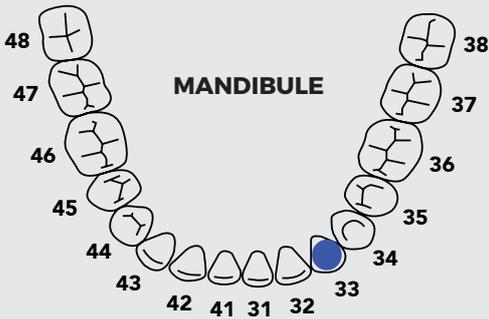

VUE ENDO-BUCCALE
AVEC FIL MANDIBULAIRE



- Préparation classique avec mordantage (Etching orthodontique de chez GC conseillé)
- Colle contenant un primer métal (GC Ortho Connect Flow conseillé)



1 Nettoyage



2 Etching
(GC Ortho Etching Gel conseillé)



3 Rinçage/ séchage



4 Positionnement du fil avec ou sans guide de transfert



5 Colle contenant un primer métal
(GC Ortho Connect Flow conseillé)



6 Polymérisation