

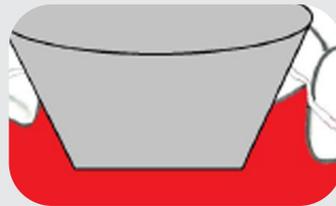


PROTOCOLE DE COLLAGE INDIRECT SMILERS® FIL


REPÈRES DE COULEUR SUR LES FILS AU NIVEAU DE **23** ET **33**

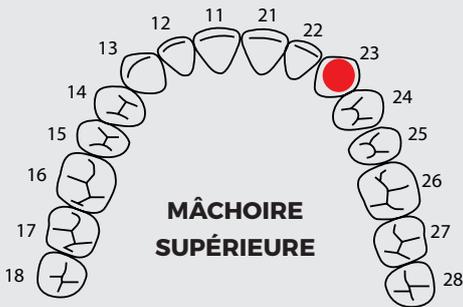

**VUE ENDO-BUCCALE
AVEC FIL MAXILLAIRE**

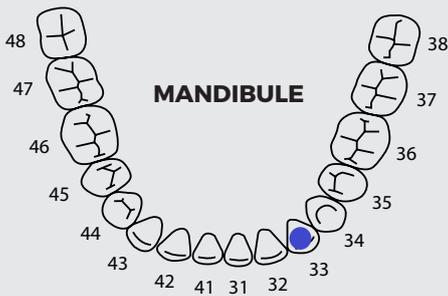

**VUE ENDO-BUCCALE AVEC
FIL MANDIBULAIRE**

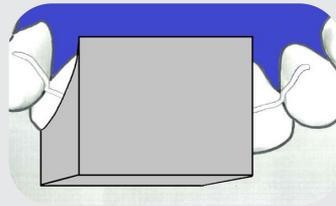

1

Nettoyage

2

Etching

(GC Ortho Etching Gel conseillé)

3

Rinçage / séchage

4

Positionnement du fil
avec la clé de transfert

5

Collage des extrémités avec une colle
contenant un primer métal
(GC Ortho Connect Flow conseillé)

6

Retrait de la clé
de transfert

Polymérisation

7

Collage des dents positionnées
sous la clé de transfert
avec colle contenant un primer métal
(GC Ortho Connect Flow conseillé)

Polymérisation