



PROTHÈSE UNITAIRE TRANSVISSÉE

PROTOCOLE DE POSE DU PILIER UNI-POST



PROTOCOLE



BIOTECH DENTAL

CHOIX ET POSE DU PILIER UNI-POST



1

Choisir un pilier Uni-Post (diamètre et hauteur) en fonction de la dent à remplacer et de la hauteur gingivale. Serrer le pilier Uni-Post à 20 N.cm à l'aide du tournevis KTP09.



2

Mettre en place une coiffe de cicatrisation adaptée. Serrer manuellement (10N.cm).

RÉALISATION PROTHÉTIQUE SUR PILIER UNI-POST



1


Dévisser la coiffe de cicatrisation.

PRISE D'EMPREINTE FERMÉE



2a


Mettre en place le transfert Pop-Up avec le plastic-cap (porte-empreinte fermé) et procéder à la prise d'empreinte.

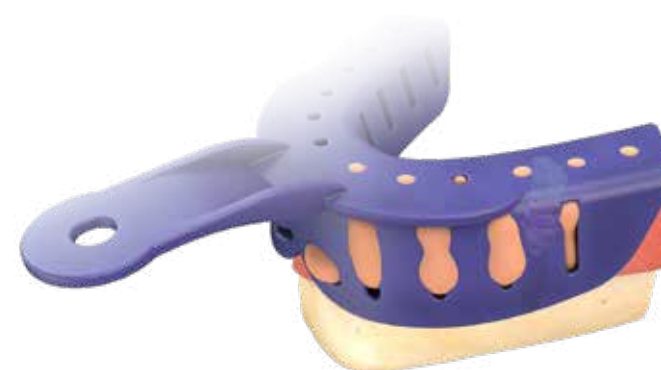

3a

Après durcissement complet du matériau d'empreintes, retirer le porte-empreinte de la bouche du patient. Le plastic-cap reste dans l'empreinte. Dévisser le transfert et transmettre le tout au prothésiste avec la prise d'empreinte.

AU LABORATOIRE

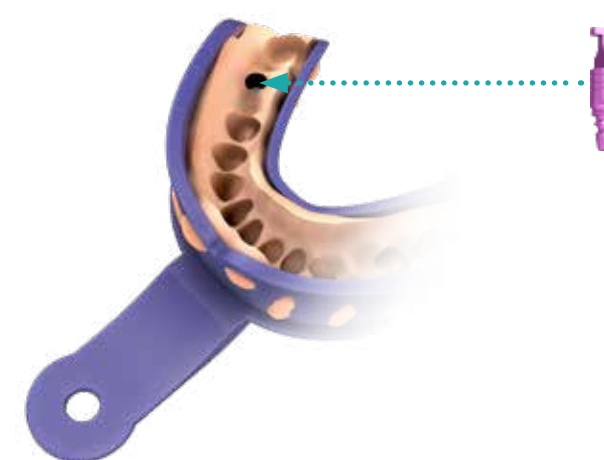

4a

Connecter l'analogue du pilier Uni-Post au transfert Pop-up. Réinsérer le tout dans le porte-empreinte. Jusqu'au clipage dans le plastic-cap. Procéder à la coulée du modèle en plâtre.

..... PRISE D'EMPREINTE OUVERTE




2b

Mettre en place le transfert Pick-Up (porte-empreinte ouvert) et procéder à la prise d'empreinte.



3b

Ajouter le porte-empreinte au niveau du transfert pour qu'il puisse dépasser.
Après durcissement complet du matériau d'empreintes, dévisser entièrement la vis du transfert en bouche au travers du porte-empreinte et désinsérer celui-ci. Transmettre le tout au prothésiste.

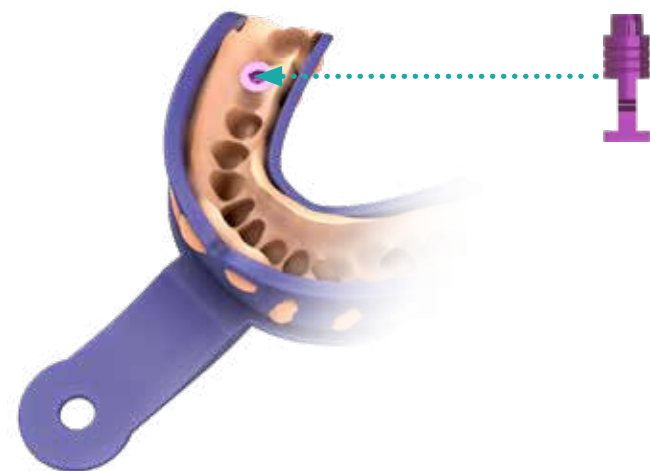

4b

Connecter l'analogue au transfert Pick-Up resté dans le porte-empreinte.
Procéder à la coulée du modèle en plâtre.

AU LABORATOIRE

———— RÉALISATION D'UNE DENT PROVISOIRE ————



1

Choisir la gaine en Titane ou la gaine provisoire en PEEK adaptée au diamètre du pilier. Ajuster la gaine à la bonne hauteur en fonction de l'occlusion. Procéder au montage de la résine.



2

Visser la dent provisoire sur le pilier Uni-Post. Serrer à 20 N.cm. Reboucher le puit de transfixation.

———— PHASE LABORATOIRE ————



1

Procéder à la coulée du modèle en plâtre équipé de sa fausse gencive en silicone souple.



2

Choisir la gaine calcinable adaptée au diamètre du pilier.



3

Réaliser l'armature métallique.

POSE DE LA PROTHÈSE DÉFINITIVE



4

Procéder au montage de la céramique et à la finition totale de la prothèse. Visser la prothèse en bouche sur le pilier Uni-Post. Serrer à 20 N.cm. Reboucher le puit de transfixation.

Gamme Uni-Post

Piliers indexés Uni-Post*

	Références	Désignations	Diamètres	Hauteurs	Longueurs
	KPV401	Pilier indexé Uni-Post	Ø 4 mm	1 mm	
	KPV402			2 mm	
	KPV403			3 mm	
	KPV404			4 mm	
	KPV405			5 mm	
	KPV501	Pilier indexé Uni-Post	Ø 5 mm	1 mm	
	KPV502			2 mm	
	KPV503			3 mm	
	KPV504			4 mm	
	KPV505			5 mm	
	KPV652	Pilier indexé Uni-Post	Ø 6,5 mm	2 mm	
	KPV653			3 mm	
	KPV654			4 mm	
	KPV655			5 mm	
	KTP09S	Tournevis hexagonal étroit court			8 mm
	KTP09	Tournevis hexagonal étroit			12 mm
	KTP09L	Tournevis hexagonal étroit long			18 mm
	KTP09CAS	Tournevis hexagonal étroit contre-angle court			20 mm
	KTP09CA	Tournevis hexagonal étroit contre-angle			24,5 mm
	KTP09CAL	Tournevis hexagonal étroit contre-angle long			30 mm

20 N.cm

*Attention : compatible sur tous les diamètres d'implants Kontakt® et Kontakt S® excepté le diamètre 3 mm.

Coiffes de cicatrisation pour piliers Uni-Post

	Références	Désignations	Diamètres	Hauteurs
	KPVCC404	Coiffes de cicatrisation pour piliers indexés Uni-Post	Ø 4 mm	4 mm
	KPVCC504		Ø 5 mm	
	KPVCC654		Ø 6,5 mm	
	KPVCC406	Coiffes de cicatrisation pour piliers indexés Uni-Post	Ø 4 mm	6 mm
	KPVCC506		Ø 5 mm	
	KPVCC656		Ø 6,5 mm	

10 N.cm

BIOTECH DENTAL
KONTACT

8

10 N.cm



9



NOTES

10 |



Biotech Dental
305, Allées de Craponne
13300 Salon de Provence - FRANCE



Tél. : +33 (0)4 90 44 60 60
Fax : +33 (0)4 90 44 60 61



info@biotech-dental.com



www.biotech-dental.com



UPPERSIDE

133, Boulevard Haussmann
75008 Paris - FRANCE

contact@groupe-upperside.com

www.groupe-upperside.com



AFNOR Cert 73017

KON-PT-4-FR_Rév.00_11/2018



BIOTECH DENTAL

Fabriqué par : Biotech Dental.

Biotech Dental - S.A.S au capital de 24 866 417 € - RCS Salon de Provence : 795 001 304 - SIRET : 795 001 304 00018 - N° TVA : FR 31 79 500 13 04.
Dispositifs médicaux de classe I, IIa et IIb destinés à l'implantologie dentaire. CE0459. Lire attentivement les instructions figurants dans la notice.
Non remboursé par la sécurité sociale. Visuels non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Imprimerie VALLIERE - 163, Avenue du Luxembourg - ZAC des Molières - 13140 MIRAMAS.