


smilers®

PROTOCOLE DE COLLAGE DIRECT

Smilers® FIX avec ergots

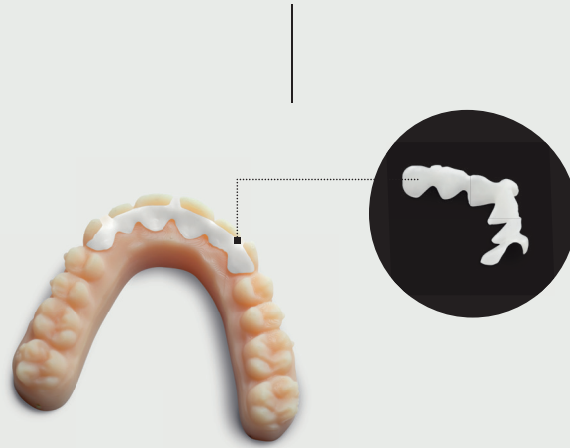

ATTENTION

NE POSER LA CONTENTION SMILERS® FIX QU'APRÈS
UNE PHASE DE CONTENTION PAR GOUTTIÈRES.

1. Essayer la contention pour vérifier la bonne adaptation.
2. Réaliser le mordançage.
3. Rincer et sécher. Les surfaces amélaire doivent avoir un aspect crayeux.
4. Appliquer un adhésif.
5. Laisser agir et sécher.
6. Photopolymériser.
7. Appliquer de l'adhésif (le même que sur les dents) sur l'intrados de la Smilers® FIX .
8. Sécher et photopolymériser.
9. Enduire l'intrados de la contention de composite ou de ciment de collage et appliquer sur les surfaces dentaires également.
10. Placer délicatement la contention en bouche et vérifier la bonne adaptation.
11. Réaliser une photopolymérisation flash à plusieurs endroits, puis enlever les excédents.
12. Faire une photopolymérisation complète à plusieurs endroits à travers la contention.
13. Couper les ergots avec une fraise diamantée.
14. Nettoyer tous les excès de composite ou de ciment de collage avec une fraise. Polir la contention si besoin avec une cupule à polir.



Veillez à respecter le protocole associé au produit que vous utilisez
(adhésif, composite ou ciment de collage).