



FROGGYMOUTH

FROGGYMOUTH, L'OEUVRE D'UNE VIE

Le Dr Patrick Fellus est un orthodontiste français qui a consacré 45 années de sa vie à l'amélioration de l'orthodontie fonctionnelle et pédiatrique.

Avant de rejoindre l'hôpital universitaire Robert-Debré à Paris, il s'est formé auprès du Pr Deffez et du Pr Delaire, se concentrant sur la compréhension de l'étiologie des déformations.

Il est l'un des fondateurs de l'IFUNA et de l'IPOS, et le Président Fondateur de la Société Française d'Orthodontie Pédiatrique (SFOP).

En 2012, il a synthétisé toute son expérience pour créer un dispositif nouveau, simple et facile d'utilisation, qui lui manquait dans sa pratique : Froggymouth.



DR PATRICK FELLUS

Orthodontiste français, spécialiste d'orthodontie fonctionnelle et pédiatrique
Formé par le Pr Deffez et le Pr Delaire

Constitution d'une unité de prise en charge pluridisciplinaire
(Hôpital universitaire Robert Debré, Paris)

Création de la SFOP

(Société Française d'Orthodontie Pédiatrique) dont il deviendra Président d'Honneur **et de l'IPOS** (International Pediatric Orthodontic Society)

Membre fondateur de l'IFUNA (International Functional Association)

Rédaction de 5 livres et de plus de 100 articles sur ces sujets



Présentation de ses travaux dans les plus prestigieuses universités
(Yale University) **et congrès** (FDI, WFO)

Récompensé par le ministère de la Santé pour ses travaux, **nommé membre titulaire de l'Académie Nationale de Chirurgie Dentaire** (ANCD)

APPAREIL DE **RÉÉDUCATION** FONCTIONNELLE PASSIVE

- ✓ Corrige la posture linguale
- ✓ Rééduque la déglutition
- ✓ Restaure une respiration nasale
- ✓ Guide la croissance orofaciale chez l'enfant
- ✓ Normalise l'environnement fonctionnel chez l'adulte pour stabiliser les résultats



DÈS 3 ANS
ET SANS LIMITE D'ÂGE



Sans Latex
ni Phtalates



Marquage
CE



Fabrication
Française



Production
ISO 13485



Production
ISO 9001



ARC DE CUPIDON

LÈVRE SUPÉRIEURE

LÈVRE INFÉRIEURE

FROGGYMOUTH POUR L'ENFANT

LIBÉRONS LEUR POTENTIEL

Mastication, déglutition, et respiration sont des praxies qui interagissent et s'influencent en permanence. Le dysfonctionnement de l'une d'entre elles suffit à perturber la croissance de l'enfant.

Chez une grande partie de la population, la succion-déglutition subsiste après l'apparition des molaires de lait et les fonctions de la sphère orale sont alors dérégées. Les patients doivent être prises en charge précocement selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Le rétablissement de l'équilibre fonctionnel est alors une priorité.

En corrigeant les dysfonctions, le Froggymouth permet :

- ✓ Une interception des déformations
- ✓ Une meilleure qualité des résultats
- ✓ Une diminution des risques de récidence

"Traiter précocement, dès que possible, est un devoir du praticien pour permettre à chaque enfant de bien grandir et d'exprimer son potentiel"

Dr Patrick Fellus, Inventeur du Froggymouth





RÉÉDUCATION PASSIVE

La mauvaise coopération du patient est la principale cause d'échec en rééducation fonctionnelle, il est donc important de n'imposer que les contraintes nécessaires. Le Froggymouth, appareil non invasif, au port limité à 15 minutes par jour devant la télévision, permet une rééducation simple et efficace.



AUTOMATISATION DE LA PRAXIE

Une approche anoétique (passive) facilite l'automatisation de l'équilibre fonctionnel, critère essentiel d'une rééducation aboutie. Deux études cliniques indépendantes, disponibles sur le site www.froggymouth.com ont démontré l'efficacité de Froggymouth pour automatiser la déglutition secondaire en 10 semaines.



COMPTABLE AVEC TOUS LES TRAITEMENTS

Le Froggymouth se porte entre les lèvres et est ainsi compatible avec tous les appareillages orthodontiques. Il peut être utilisé avant, pendant, et/ou après le traitement (en prenant toujours en compte la compatibilité du cadre anatomique avec une rééducation).

FROGGYMOUTH

RÉÉDUCER LA FONCTION, PÉRENNISER SES RÉSULTATS

Les dysfonctions oro-faciales sont les principales causes des dysmorphoses traitées. Un traitement orthodontique implique de supprimer les causes et donc assurer un équilibre fonctionnel. Cela fait partie des critères d'aboutissement d'un traitement tel que définis par la Haute Autorité de Santé.


C'est pourquoi la posture linguale doit être rééduquée en parallèle du traitement par aligneurs afin de proposer une stabilité mécanique et fonctionnelle pérenne.

En quelques mois, le dispositif Froggymouth permet l'abandon de la déglutition atypique et le passage à la déglutition secondaire, favorisant la respiration nasale.

Le Froggymouth, par son approche passive, permet de rééduquer adolescent comme adulte. Cela donne une vraie valeur ajoutée à vos traitements Smilers® tout en pérennisant les résultats.



LE PROTOCOLE SMILERS® & FROGGYMOUTH

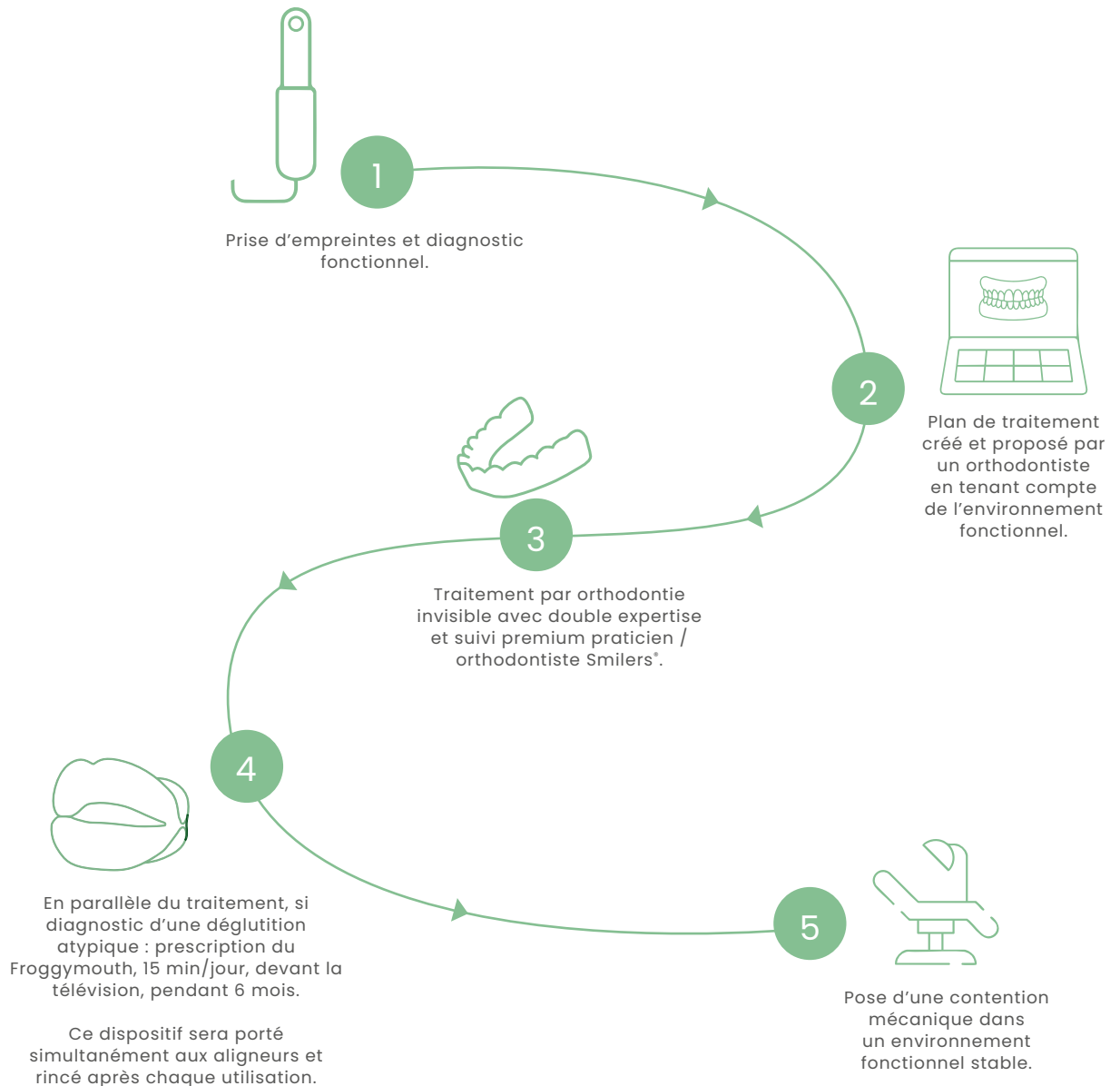

COMMENT CHOISIR SON FROGGYMOUTH

LA RÈGLE

Horizontalement, le Froggymouth doit être légèrement plus petit que la taille de la bouche du patient.

POURQUOI ?

L'action du Froggymouth est d'inhiber le nerf facial et donc empêcher les contractions des muscles labio-mentonniers et jugaux lors de la déglutition. L'inhibition du nerf facial favorisera l'action de son antagonique, le nerf trijumeau.

Ce dernier contrôle les centres de la respiration dans le tegmentum pontique par son noyau sensitif et favorisera donc une restauration de la respiration nasale.

Vous comprenez ainsi pourquoi un Froggymouth horizontalement plus grand que l'écart inter-commissural ne sera pas adapté.





Ainsi, en cas de doute entre deux tailles, nous recommanderons toujours la plus petite. Cela permettra d'éviter d'étirer les lèvres au niveau des commissures et ainsi de stimuler le nerf facial.



VIDÉOS

Découvrez l'ensemble de nos contenus vidéo sur l'utilisation de l'appareil, la rééducation fonctionnelle et bien plus encore, directement sur notre chaîne Youtube.



www.youtube.com/@FROGGYMOUTH3297

FROGGYDAYS

Les replays du premier e-congrès dédié à la rééducation fonctionnelle avec Froggymouth sont disponibles en cinq langues (FR,EN,IT,ES,RU).



www.froggydays.online/replay

FORMATIONS

Nous proposons des formations régulières en ligne pour toutes les personnes intéressées par Froggymouth.



www.froggymouth-formations.com





KIT PRATICIEN FROGGYMOUTH


Une solution complète pour débiter la rééducation fonctionnelle.

Conçu pour les professionnels souhaitant intégrer Froggymouth dans leur pratique, ce kit offre tous les éléments nécessaires pour une mise en œuvre efficace :


- 12 appareils Froggymouth (tailles au choix)
- 1 ouvrage de référence au choix parmi les publications du Dr Patrick Fellus
- Accès aux vidéos et protocoles d'utilisation pour le praticien et le patient

Ce kit est idéal pour une première approche du traitement Froggymouth, offrant à la fois les outils pratiques et les connaissances théoriques essentielles.

NOS LIVRES

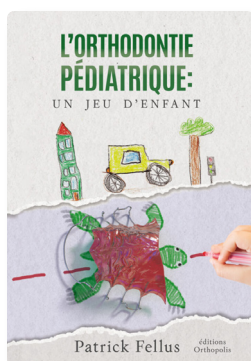

L'orthodontie pédiatrique :
un jeu d'enfant

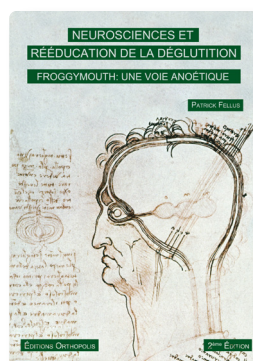

Neurosciences et rééducation de la déglutition.
Froggymouth : une voie anoétique



FROGGY MOUTH

BIOTECH DENTAL SMILERS
305 ALLÉE DE CRAPONNE

+(33) 04 13 22 82 40
CONTACT@FROGGY MOUTH.COM

WWW.FROGGY MOUTH.COM

BIOTECH DENTAL
ORTHO