

Contact Contact **N**

- MANUEL D'UTILISATION -



BIOTECH DENTAL

Avertissements et recommandations

Les implants Kontakt et Kontakt N s'adressent à des praticiens ayant acquis la formation nécessaire en implantologie.

Ils doivent être équipés de la trousse de chirurgie Kontakt avec les instruments dédiés aux implants Kontakt et Kontakt N .



Les informations contenues dans ce document sont spécifiques aux implants Kontakt et Kontakt N.

Les systèmes Kontakt et Kontakt N ne doivent être utilisés qu'avec les composants et instruments de la gamme Kontakt Biotech Dental et conformément aux modes d'emploi, protocoles et recommandations décrits dans la documentation mise à disposition par notre société.

Le praticien est responsable des complications pouvant résulter d'une utilisation ne respectant pas nos recommandations ou d'une faute d'asepsie. Ces complications ne peuvent en aucun cas être imputées à Biotech Dental.

Sommaire

1. LES IMPLANTS KONTACT & KONTACT N	P.4
1. Principes et avantages	p.5
2. Caractéristiques techniques	p.5
3. Conditionnement et références	p.11
2. CHIRURGIE	P.14
1. Trousse de chirurgie	p.15
2. Instruments spécifiques	p.19
3. Protocoles de pose	p.22
4. Butées	p.26
5. Jauge de tissu parodontal	p.28
6. Vis de cicatrisation	p.28
3. TROUSSE DE PROTHÈSE	P.30
4. INFORMATIONS GÉNÉRALES	P.32

1. Principes & avantages

Les implants Kontakt et Kontakt N profitent du même design et de la même connectique et **présentent les avantages suivants** :

- > **Stabilité tissulaire** grâce à la connectique de type cône morse, au platform switching et au profil concave de la partie transgingivale des piliers. La connectique STSystem limite les infiltrations bactériennes.
- > **Résistance mécanique** élevée grâce au design breveté de la connectique STSystem : L'importante surface de contact entre l'implant et le pilier permet d'augmenter la friction, de réduire les micromouvements et d'assurer la rétention et la stabilité du pilier.
- > **Simplicité et versatilité prothétiques**, une seule et même connectique STSystem pour tous les diamètres* d'implants permet de simplifier la gestion du stock ainsi que de simplifier le travail prothétique au fauteuil et pour le laboratoire.

2. Caractéristiques techniques


DESIGN :

Les implants Kontakt et Kontakt N profitent du **même design** et la **même connectique**.



Partie cylindrique de longueur variable suivant la longueur de l'implant.

Partie conique à fond de filet dégressif pour un vissage compressif.

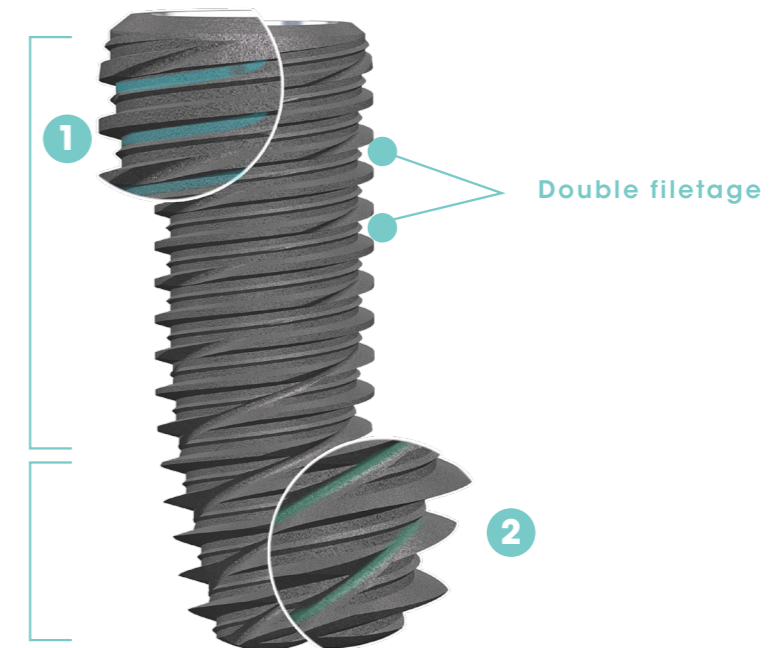


1 Filet secondaire en fond de filet « Surface Increaser » : Augmente la surface de contact pour une meilleure répartition des efforts dans l'os.

2 Auto-taraudant profilé sur toute la hauteur de l'implant « Constant Leaf » : Réduction des efforts et accroissement de la stabilité lors du vissage.

*Excepté le ø 3 mm.

1 LES IMPLANTS KONTACT™ & KONTACT™ N

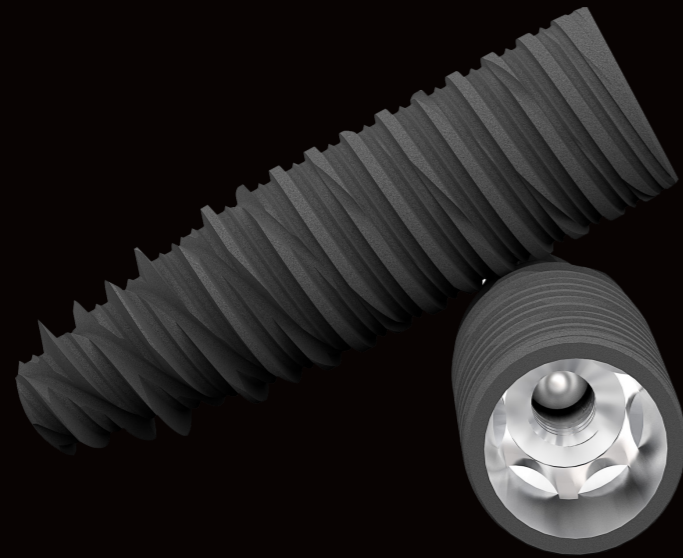


- ✓ Matériau : titane grade 5, alliant biocompatibilité et résistance
- ✓ Profil cylindro-conique
- ✓ Col d'implant chanfreiné et micro-structuré pour l'implant Kontakt™ et nano-structuré pour l'implant Kontakt N
- ✓ Platform switching
- ✓ Connectique brevetée STSystem®
- ✓ Double filetage
- ✓ Apex sphérique atraumatique
- ✓ Utilisation d'une trousse chirurgicale unique pour l'ensemble des implants de la gamme Kontakt, Kontakt N, Kontakt S, Kontakt S+, Kontakt PL, Kontakt MB.

CONNECTIQUE SIX-THREE SYSTEM (STSYSTEM)

Les gammes Kontakt présente un système de verrouillage de type cône morse.

Ce système permet de stabiliser la connexion pilier-implant, d'en assurer l'étanchéité et offre des avantages mécaniques reconnus :

- ✓ Une résistance à la traction et à la flexion : les pièces sont verrouillées,
- ✓ Une absence de micro-mouvement, de déformation ou de rupture de la vis.

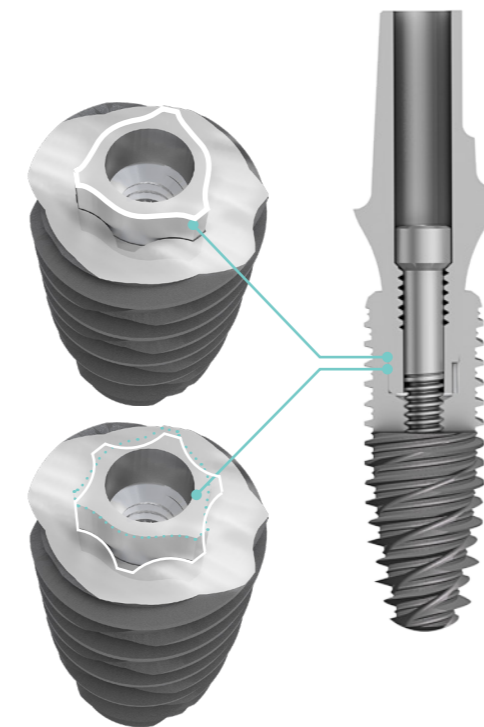

- ✓ Assemblage résistant
- ✓ Herméticité
- ✓ Insertion facilitée
- ✓ Rapidité et fiabilité dans le positionnement




Les implants Kontakt et Kontakt N sont destinés à recevoir les prothèses de la gamme Kontakt ; la connectique identique à l'ensemble de la gamme permet la compatibilité avec les piliers.

Caractéristiques techniques :

- 3 sommets d'indexation sur les pièces prothétiques,
- 6 possibilités de repositionnement.

La connectique Six-Three System permet l'utilisation de piliers indexés et non indexés.

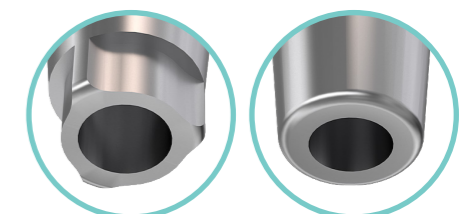

Pilier indexé

Pilier non indexé




CONNECTIQUE IMPLANTS DIAMÈTRE 3,0 MM

Les implants Kontakt et Kontakt N de diamètre 3,0 mm ont une connectique différente. Cette connectique a une indexation 6 pans par empreinte canelée. Les implants de diamètre 3,0 mm sont réservés aux espaces réduits.

Ils peuvent être utilisés pour le remplacement des incisives mandibulaires et des incisives latérales maxillaires. Ils sont destinés à la réalisation de couronnes unitaires, scellées ou transvissées.

Diamètre 3,0 mm

Indexation 6 pans par empreinte canelée pour implant de Ø 3,0 mm.

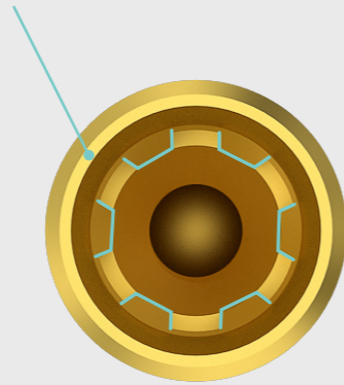


Toutes les pièces et instruments de la gamme d'implants de Ø 3,0 mm sont identifiables par leur couleur jaune et reconnaissables dans les tableaux de ce manuel car encadrés par des pointillés jaunes.



ÉTUDE DE L'INTERFACE PILIER / IMPLANT

Pour l'implant Kontakt™, une étude visant à apprécier la qualité de la connexion hermétique entre la phase prothétique et l'implant a permis de mettre en avant la fiabilité de notre système.

Elle a démontré que notre montage répondait à tous les critères d'étanchéité requis (Données précliniques Biotech Dental - Etude 30/12/2013).

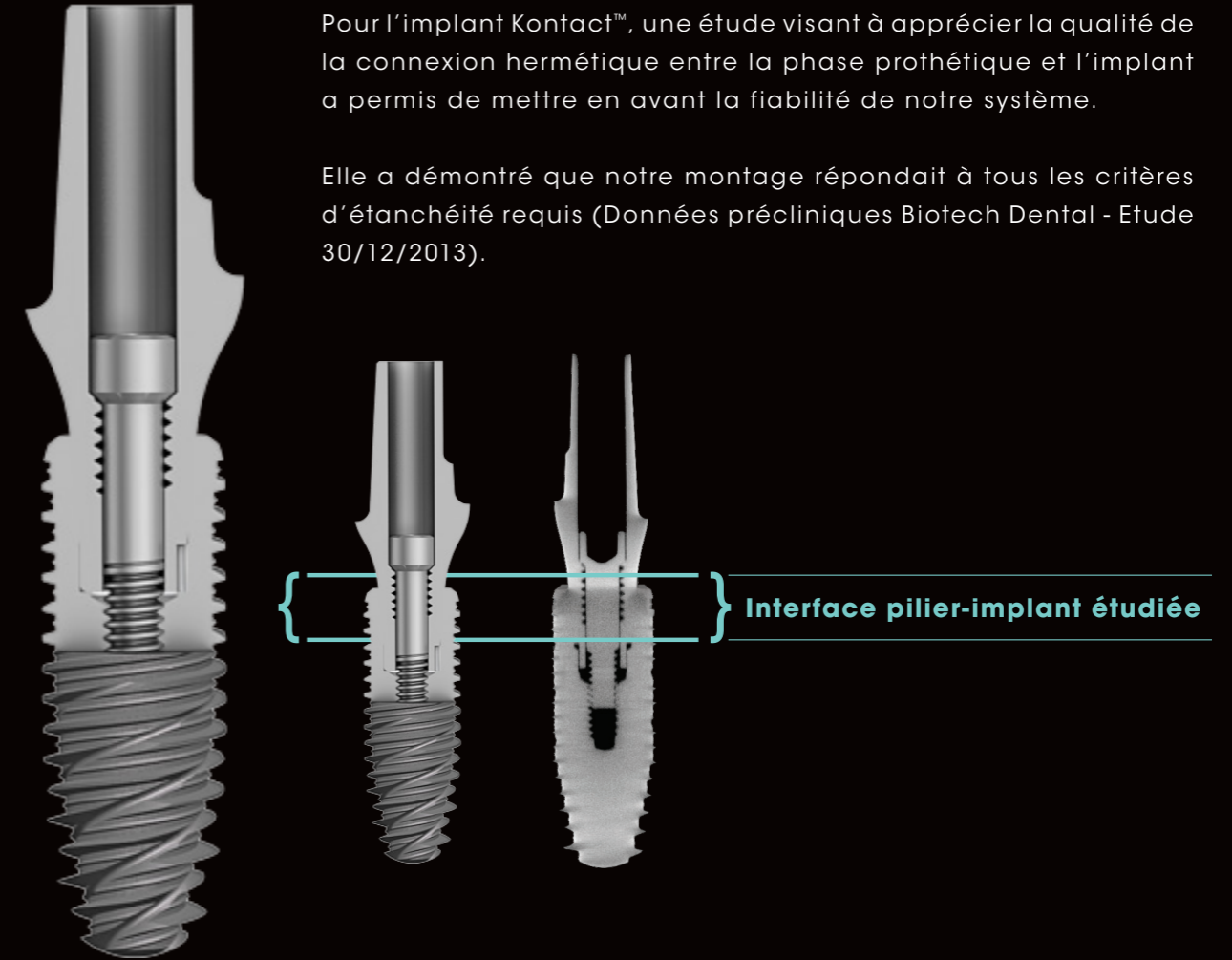

DISPOSITIF ASSEMBLÉ


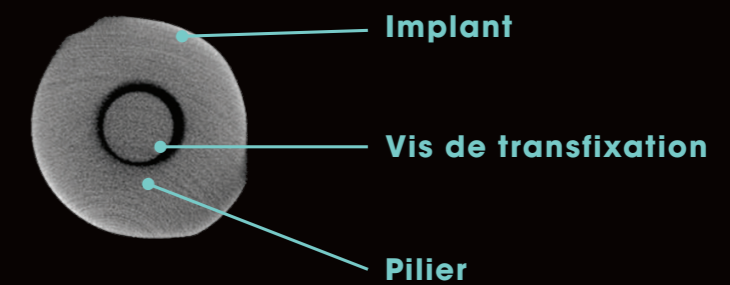


Illustration de la jonction hermétique entre le pilier et l'implant

Identique pour le Kontakt et le Kontakt N

PLATFORM SWITCHING

Les implants des gammes Kontakt et Kontakt N profitent du principe du platform switching qui consiste à l'utilisation de **pilliers prothétiques dont le diamètre d'émergence est réduit par rapport au diamètre du col de l'implant**. Cela permet de **favoriser la stabilité osseuse** (en limitant la résorption osseuse péri - implantaire) ainsi que le résultat esthétique.

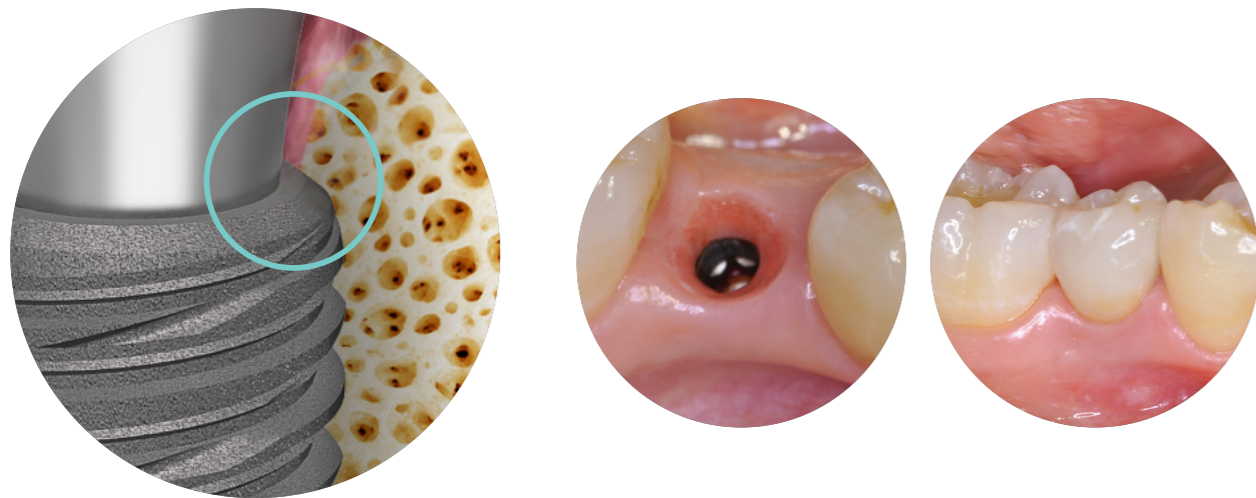

3. Conditionnement et références

Caractéristiques du packaging

- ✓ Emballage externe en carton et emballage interne avec double barrière stérile.
- ✓ Étiquettes de traçabilité (4 étiquettes patient) reprenant toutes les informations concernant l'implant.
- ✓ Support d'implant stable pour le posage sur le champ opératoire.
- ✓ Vis de couverture courte livrée avec l'implant.
- ✓ Vis de couverture haute **livrée gratuitement sur demande**.
- ✓ Collerette et butée en titane de part et d'autre de l'implant pour éviter le contact avec le plastique.
- ✓ Pastille d'identification des dimensions de l'implant sur le support d'implant.

EXEMPLE DE RÉFÉRENCE

Kontakt

K 36 12

K **36** **12**
 Kontakt™ Diamètre externe 3,6 mm Longueur 12 mm

EXEMPLE DE RÉFÉRENCE

Kontakt™ N

K 42 12 N

K **42** **12** **N**
 Kontakt™ Diamètre externe 4,2 mm Longueur 12 mm Gamme Kontakt™ N


* Pour le conditionnement, les indications et le protocole des implants Kontakt de longueur 18 mm, 20 mm, 22 mm et 24 mm se référer au protocole spécifique réf. KONXL-PT-1-FR

1



Ouverture de l'emballage carton, maintenu fermé par des étiquettes d'inviolabilité.

2

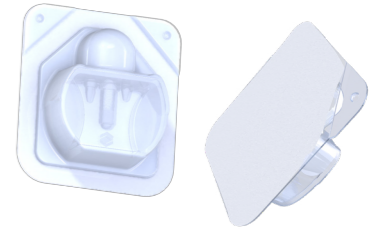

Ouverture du blister contenant le support d'implant (2^{ème} barrière stérile)

3



Pose du support d'implant sur le champ stérile et ouverture du second opercule (1^{ère} barrière stérile).

4



Préhension de l'implant avec le mandrin dédié

5




Pose de l'implant

RÉFÉRENCES DES IMPLANTS **KONTACT**

	Références	Diamètres	Longueurs
	K30-10	Ø 3 mm	10 mm
	K30-12		12 mm
	K30-14		14 mm
	K3608	Ø 3,6 mm	8 mm
	K3610		10 mm
	K3612		12 mm
	K3614		14 mm
	K3616*		16 mm
	K3618**		18 mm
	K3620**		20 mm
	K3622**		22 mm
	K4206	Ø 4,2 mm	6 mm
	K4208		8 mm
	K4210		10 mm
	K4212		12 mm
	K4214		14 mm
	K4216*		16 mm
	K4218**		18 mm
	K4220**		20 mm
	K4222**		22 mm
	K4224**		24 mm
	K4806	Ø 4,8 mm	6 mm
	K4808		8 mm
	K4810		10 mm
	K4812		12 mm
	K4814		14 mm
	K5406	Ø 5,4 mm	6 mm
	K5408		8 mm
	K5410		10 mm
	K5412		12 mm
	K5414		14 mm

Préconisation de diamètres d'implants

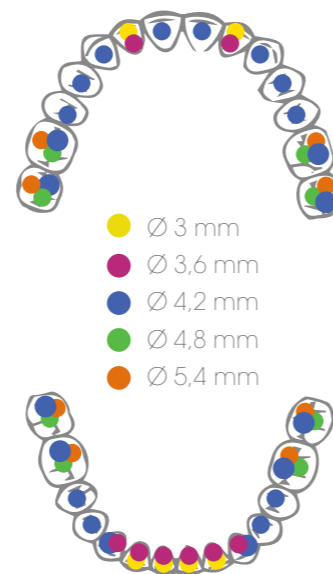

* Les forets et les alésoirs pour les implants de longueur 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm et 24 mm ne sont pas livrés avec la trousse de chirurgie mais disponibles en option sur commande

** Pour le conditionnement, les indications et le protocole des implants Kontakt de longueur 18 mm, 20 mm, 22 mm et 24 mm se référer au protocole spécifique réf. KONXL-PT-1-FR

RÉFÉRENCES DES IMPLANTS **KONTACT N**

	Références	Diamètres	Longueurs
	K3010N	Ø 3 mm	10 mm
	K3012N		12 mm
	K3014N		14 mm
	K3608N	Ø 3,6 mm	8 mm
	K3610N		10 mm
	K3612N		12 mm
	K3614N		14 mm
	K3616N*		16 mm
	K4206N		Ø 4,2 mm
K4208N	8 mm		
K4210N	10 mm		
K4212N	12 mm		
K4214N	14 mm		
K4216N*	16 mm		
	K4806N	Ø 4,8 mm	6 mm
	K4808N		8 mm
	K4810N		10 mm
	K4812N		12 mm
	K4814N		14 mm
	K5406N	Ø 5,4 mm	6 mm
	K5408N		8 mm
	K5410N		10 mm
	K5412N		12 mm
	K5414N		14 mm

* Les forets et les alésoirs spécifiques à l'implant longueur 16 mm ne sont pas livrés avec la trousse de chirurgie mais disponibles en option.


2

CHIRURGIE


Une seule et unique
trousse de chirurgie
pour tous les implants
des gammes d'implants
Kontakt

- 1 Foret de marquage Ø 1,5 mm
- 2 Forets pilotes Ø 2 mm
- 3 Jauges axiales
- 4 Forets étagés courts
- 5 Forets étagés longs
- 6 Alésoirs courts
- 6b Alésors longs
- 7 Porte-implants
- 8 Extracteurs de pilier
- 9 Tournevis de prothèse
- 10 Clé à cliquet dynamométrique de chirurgie
- 11 Prolongateur de foret

1. Trousse de chirurgie

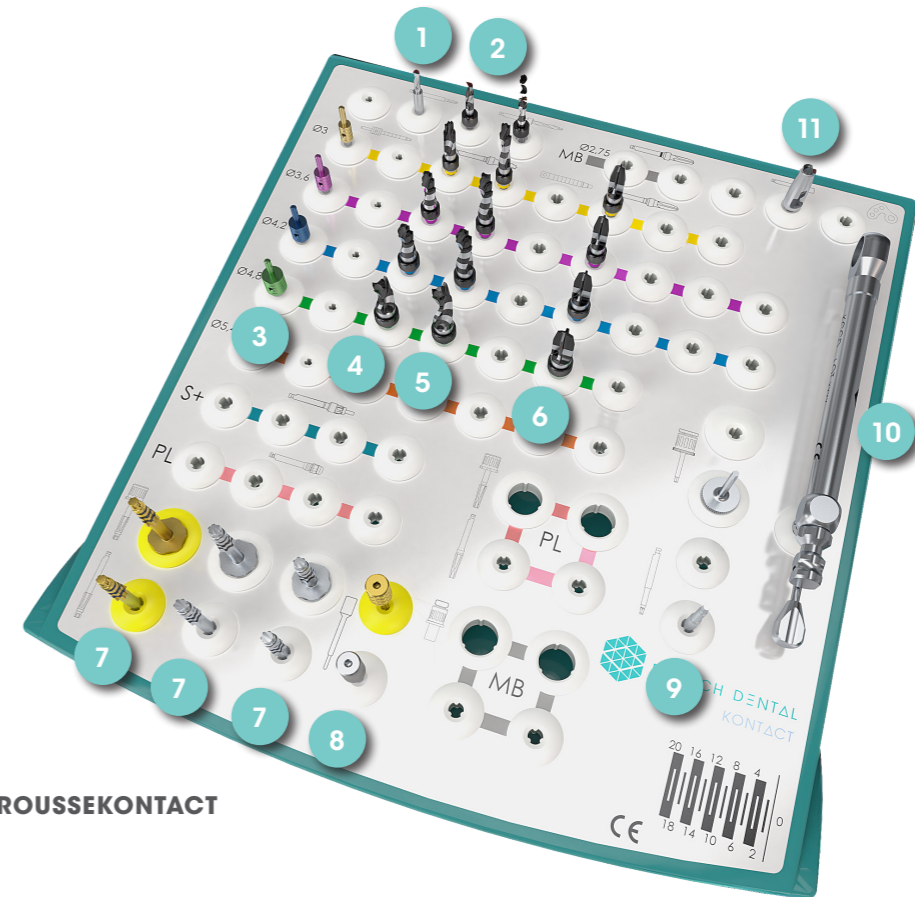



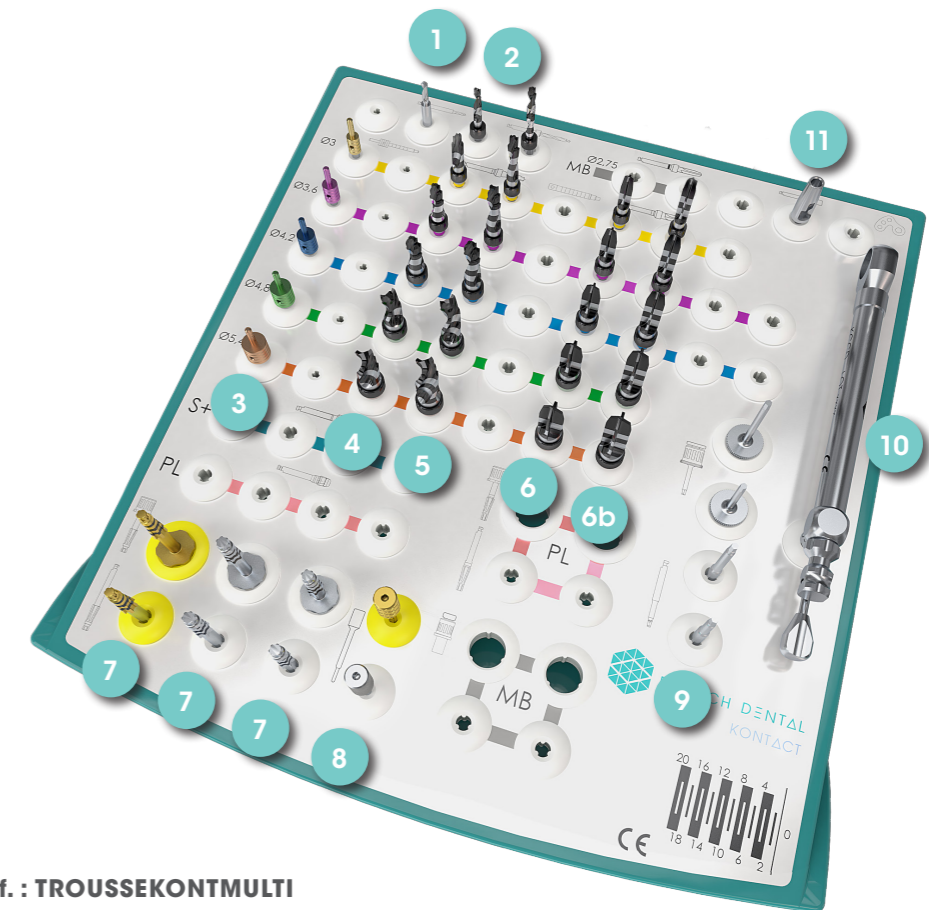















Réf. : TROUSSEKONTACT









































Réf. : TROUSSEKONTMULTI



RÉFÉRENCES DES INSTRUMENTS

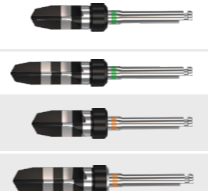	Références	Désignations	Diamètres implants	Longueurs
	ESP	Espaceur paralléliseur		
	K30EX	Extracteurs de piliers	Ø 3,0 mm	Court
	K30EXL			Long
	KEX	Extracteurs de piliers	Tous Ø	Court
	KEXL			Long
	KEXV			Extracteur de pilier (avec vis cassée)
	1001SI	Foret de marquage Ø1.5mm sans irrigation		
	KFT	Forets de marquage pointe trocar		Court
	KFTL		Long	
	KFE20	Forets pilotes Ø 2 mm		Court
	KFE20L		Long	
	KFE2016*		16 mm	
	KFE20XL		XL	
	KJA30	Jauge axiale	Ø 3,0 mm	
	KJA36	Jauges axiales	Ø 3,6 mm	
	KJA42		Ø 4,2 mm	
	KJA48		Ø 4,8 mm	
	KJA54		Ø 5,4 mm	


 En option pour la TROUSSEKONTACT
 En option pour la TROUSSEKONTMULTI

 Instruments spécifiques à la gamme d'implant Ø 3 mm.

	Références	Désignations	Diamètres implants	Longueurs	Couleurs
	KFE30	Forets étagés	Ø 3,0 mm	Court	
	KFE30L			Long	
	KFE3016*			16 mm	
	KFE30XL			XL	
	KFE36	Forets étagés	Ø 3,6 mm	Court	
	KFE36L			Long	
	KFE3616*			16 mm	
	KFE36XL			XL	
	KFE42	Forets étagés	Ø 4,2 mm	Court	
	KFE42L			Long	
	KFE4216*			16 mm	
	KFE42XL			XL	
	KFE48	Forets étagés	Ø 4,8 mm	Court	
	KFE48L			Long	
	KFE54	Forets étagés	Ø 5,4 mm	Court	
	KFE54L			Long	
	KF30	Alésoirs	Ø 3,0 mm	Court	
	KF30L			Long	
	KF36	Alésoirs	Ø 3,6 mm	Court	
	KF36L			Long	
	KF3616*			16 mm	
	KF42	Alésoirs	Ø 4,2 mm	Court	
	KF42L			Long	
	KF4216*			16 mm	
	KF48	Alésoirs	Ø 4,8 mm	Court	
	KF48L			Long	
	KF54	Alésoirs	Ø 5,4 mm	Court	
	KF54L			Long	





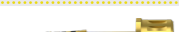


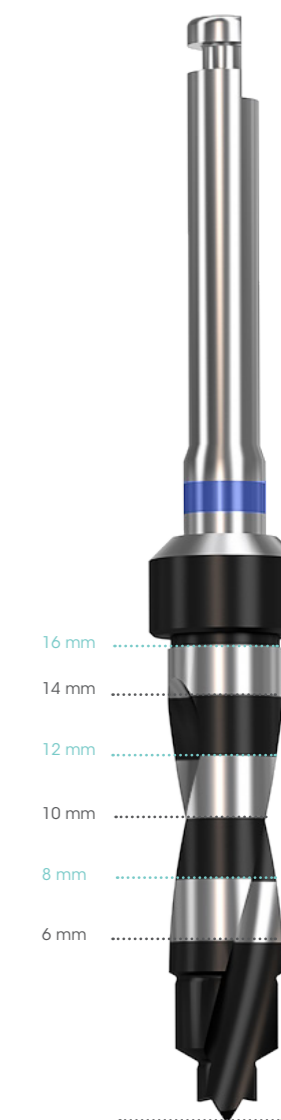





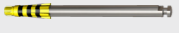










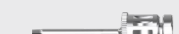

 En option pour la TROUSSEKONTACT
 En option pour la TROUSSEKONTMULTI

 Instruments spécifiques à la gamme d'implant Ø 3 mm.



* Les forets et les alésoirs pour les implants de longueur 16 mm et XL ne sont pas livrés avec la trousse de chirurgie mais disponibles en option sur commande.

2. Instruments spécifiques

	Références	Désignations	Diamètres implants	Longueurs
	K30MPICA	Mandrin contre-angle	Ø 3,0 mm	
	KMPICAC	Mandrins contre-angle	Autres Ø	Court
	KMPICAL			Long
	KMPICAXL			Extra long
	K30MPI			Mandrin manuel
	KMPIC	Mandrins manuels	Autres Ø	Court
	KMPIL			Long
	KMPIXL			Extra long
	TCAS	Tournevis hexagonal contre-angle		Court
	TCA			Standard
	TCAL			Long
	1028	Prolongateur de foret *		
	1032S	Tournevis manuels		Court
	1032			Standard
	1032L			Long
	KCCD	Clé à cliquet dynamométrique chirurgie Kontakt		
	KCCDL	Clé à cliquet dynamométrique longue chirurgie Kontakt		
	KJP30	Jauge de profondeur forage terminal	Ø 3,0 mm	
	KJP36	Jauges de profondeur forage terminal		Ø 3,6 mm
	KJP42			Ø 4,2 mm
	KJP48			Ø 4,8 mm
	KJP54			Ø 5,4 mm
	KJP20XL	Jauges axiales XL 18-20-22-24mm		Ø 2 mm
	KJP30XL			Ø 3,0 mm
	KJP36XL			Ø 3,6 mm
	KJP42XL			Ø 4,2 mm

* Le 1028 ne doit pas s'utiliser avec les portes implants au risque d'une rupture du dispositif






 En option pour la TROUSSEKONTACT
 En option pour la TROUSSEKONTMULTI


 Instruments spécifiques à la gamme d'implant Ø 3 mm.

TRÉPANS POUR EXTRACTION D'IMPLANTS

Le retrait d'un implant requiert un trépan d'extraction. Il existe un trépan par diamètre d'implant.

 **Recommandation de vitesse d'utilisation :** 500 à 800 trs/min avec irrigation.

	Références	Désignation	Ø Intérieur	Ø Extérieur	Lg. max interne
	KTEI30	Trépan pour extraction d'implants	3,4 mm	4,0 mm	18 mm
	KTEI36		4 mm	4,6 mm	
	KTEI42		4,6 mm	5,2 mm	
	KTEI48		5,2 mm	5,8 mm	
	KTEI54		5,8 mm	6,4 mm	

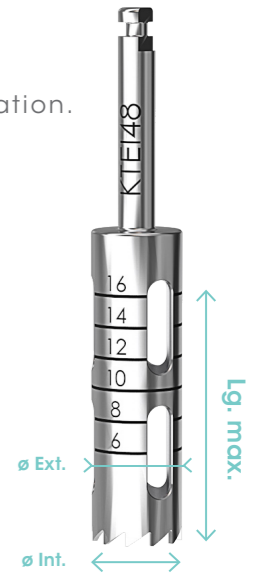




 Instruments spécifiques à la gamme d'implant Ø 3 mm.

FORETS CORTICAUX AVEC GUIDAGE DANS L'IMPLANT

Compatible avec les implants **Kontakt** et **Kontakt N**, le foret cortical permet de retirer si besoin les excès d'os supra-implantaire et d'assurer la bonne mise en place des vis de cicatrisation ou piliers droits ou angulés. Le foret cortical est muni à son extrémité d'un embout de centrage en **PEEK**.


Placé dans l'implant, il permettra également de stabiliser l'instrument lors de sa rotation et de préserver la connectique.

	Références	Désignations	Diamètres pièces prothétiques	Stérilisation nécessaire	Nb d'utilisations préconisées
	KFC30	Foret cortical pour vis de cicatrisation	Ø 3,0 mm	Oui	20
	KFC4-5	Forets corticaux standards pour vis de cicatrisation	Ø 4,0 mm - Ø 5,0 mm	Oui	20
	KFC65		Ø 6,5 mm	Oui	20

 **Recommandation de vitesse d'utilisation : 200 trs / min.**

 Instruments spécifiques à la gamme d'implant Ø 3 mm.


PROTOCOLE FORETS CORTICAUX

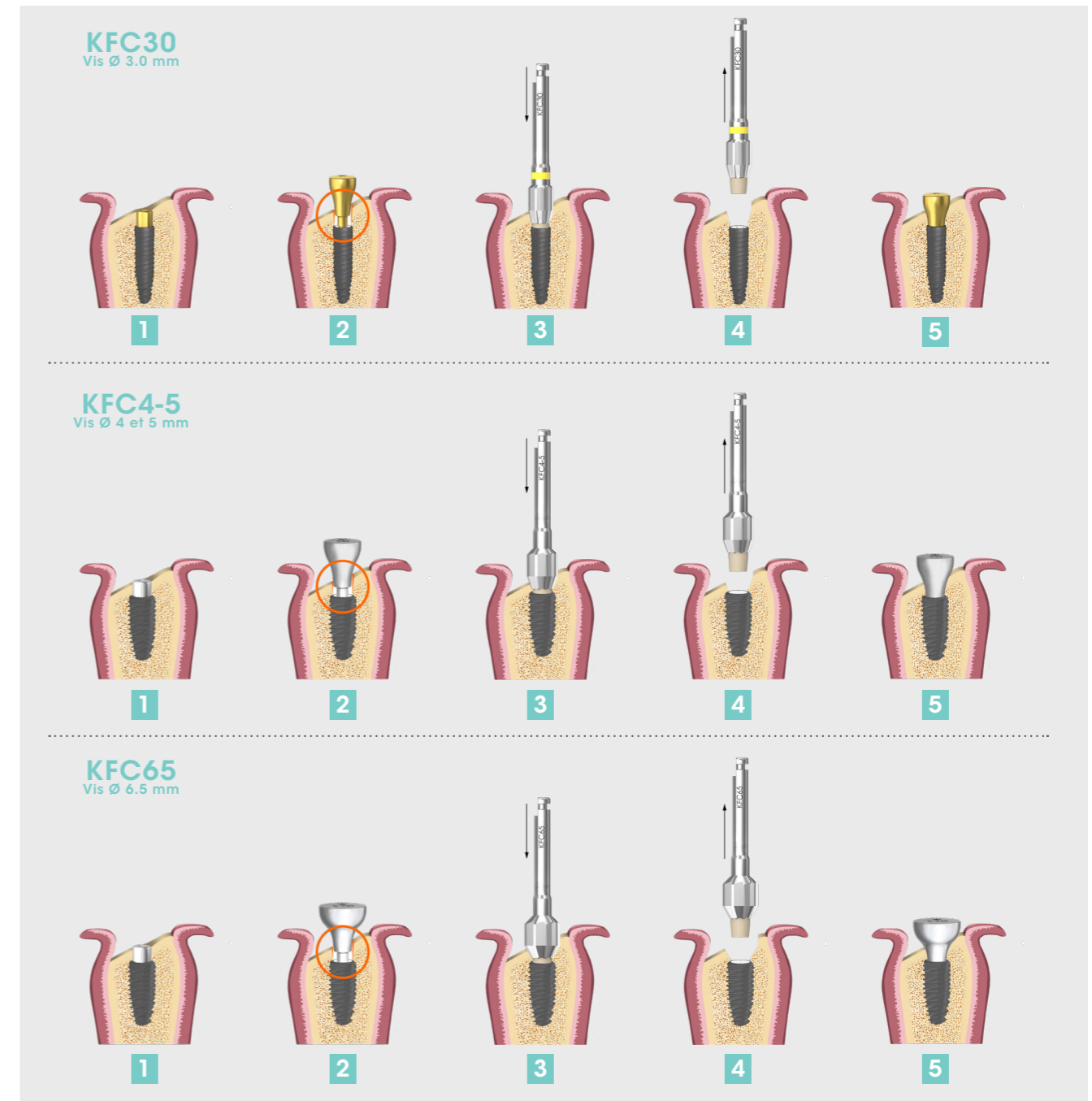






- 1** Enlever la vis de couverture de l'implant.
- 2** Essayer de positionner la vis de cicatrisation choisie, si la vis vient buter sur des excès d'os supra-implantaire, utiliser le foret cortical.
- 3** Insérer le foret cortical dans la connectique de l'implant. Vitesse de rotation 200 trs / min. Il n'est pas nécessaire d'appuyer.
- 4** Enlever le foret cortical de la connectique de l'implant.
- 5** Positionner la vis de cicatrisation pour l'implant de votre choix.

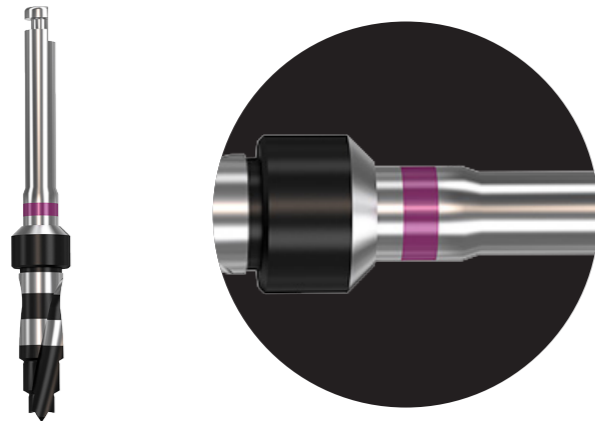3. Protocoles de pose


Une bague de couleur sur les forets permet d'identifier le diamètre d'implant correspondant.









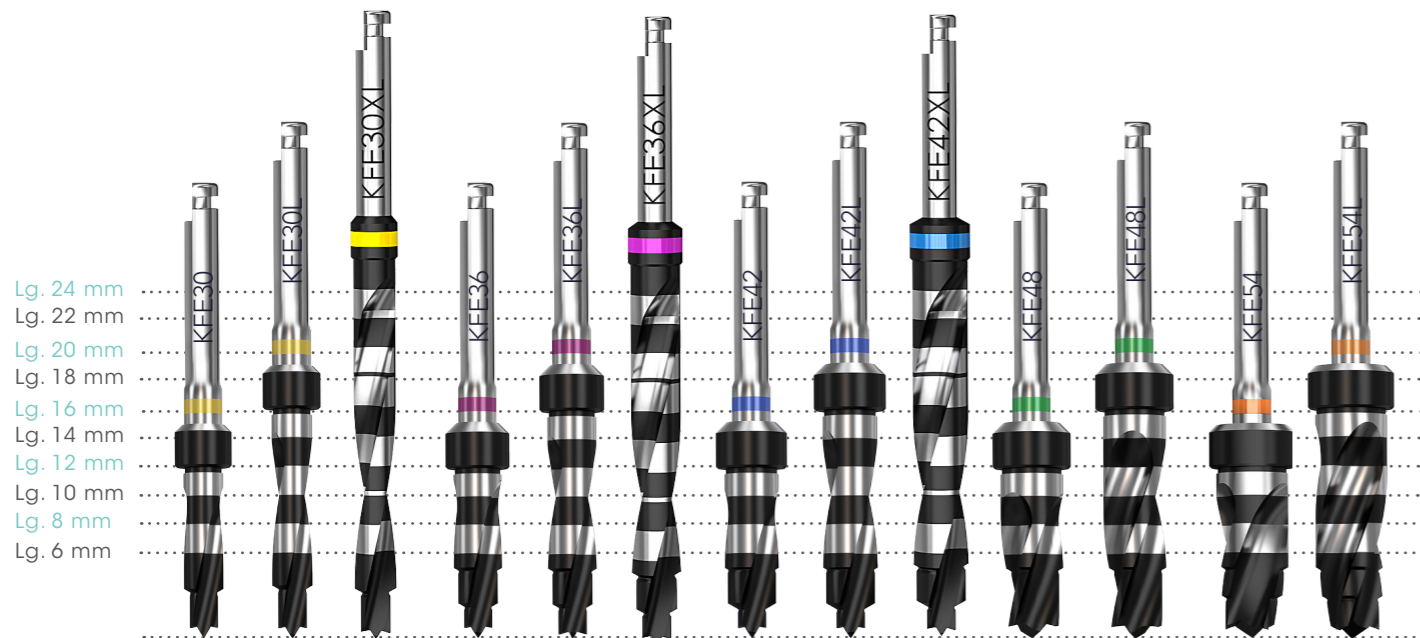










COULEURS	DIAMÈTRES (mm)
	3,0
	3,6
	4,2
	4,8
	5,4

Le diamètre et la profondeur de forage sont déterminés lors de la préparation du plan de traitement. Marquage clair et précis sur les forets pour indiquer les différentes longueurs de forage.

LONGUEURS DES FORETS




SÉQUENCES DE FORAGE

Implants Kontakt	Foret de marquage Ø 1,5 mm	Foret pilote Ø 2 mm	Foret Ø 3,0 mm	Foret Ø 3,6 mm	Foret Ø 4,2 mm	Foret Ø 4,8 mm	Foret Ø 5,4 mm	Alésoirs	
	1500 trs / min		1000-1200 trs / min			700-900 trs / min		200 trs / min	
 Ø 3,0 mm								 KF30 (L)	
 Ø 3,6 mm								 KF36 (L)	
 Ø 4,2 mm	 1001SI	 KFE20 (L)	 KFE30 (L)					 KF42 (L)	
 Ø 4,8 mm				 KFE36 (L)				 K48 (L)	
 Ø 5,4 mm						 KFE42 (L)	 KFE48 (L)	 KFE54(L)	 KF54 (L)

PROCOLES DE FORAGE PAR DIAMÈTRE

Les protocoles de forage sont strictement identiques pour les implants Kontakt et les implants Kontakt N.

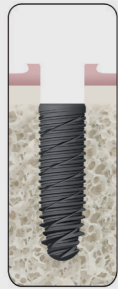

! RECOMMANDÉ

Implant enfoui de **2 mm sous-crestal** afin de favoriser la repousse osseuse sur le plateau de l'implant.

- Surforer de 2 mm en profondeur par rapport à la longueur de l'implant pour une pose sous-crestale recommandée de 2 mm.




Couple pour le vissage de l'implant : 80 N.cm maximum
Vitesse de rotation recommandée : 15 trs / min.

Ø
3,0 mm



Exemple : K3012

Ø
4,8 mm

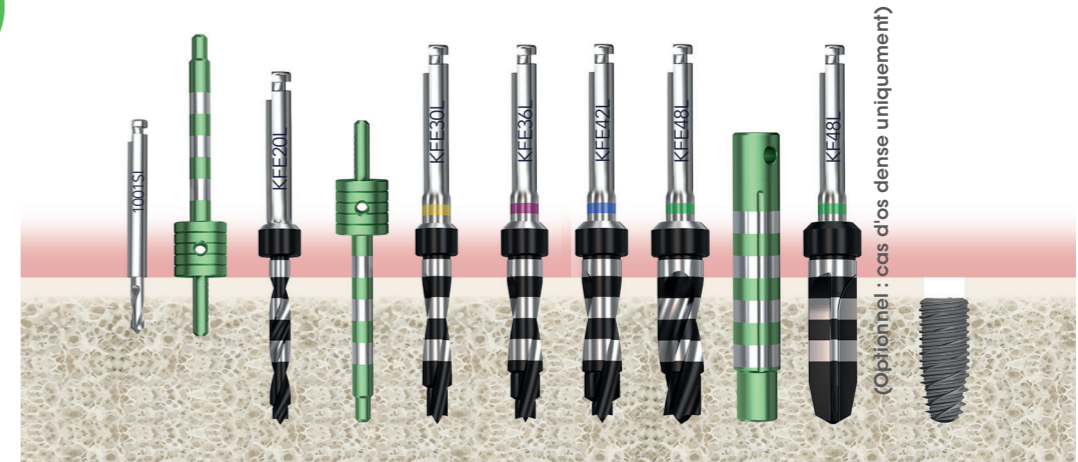

Exemple : K4812

Ø
3,6 mm



Exemple : K3612

Ø
5,4 mm



Exemple : K5412

Ø
4,2 mm





Exemple : K4212

4. Butées

Kit de butées Kontakt :

- > Livrées dans un kit spécifique, stérilisable.

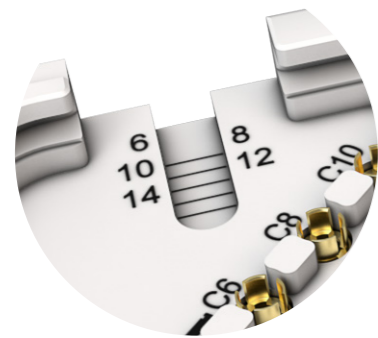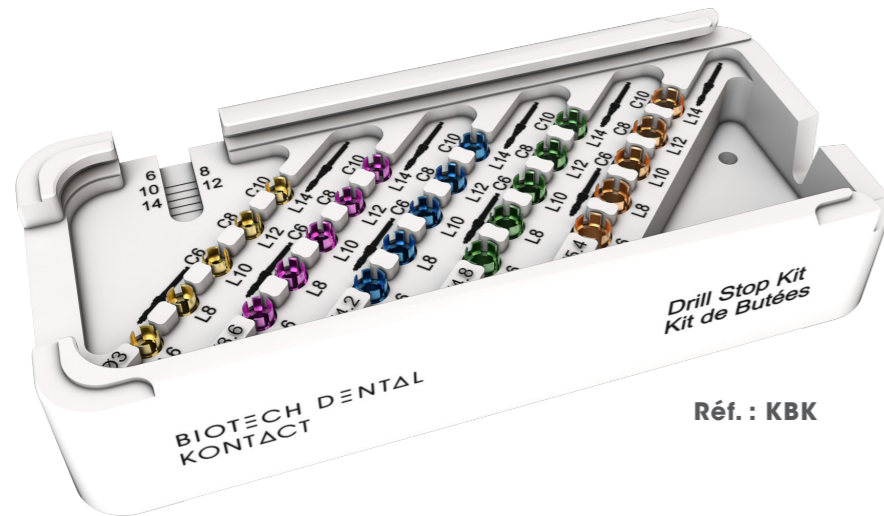


Le kit est muni d'un réglelet permettant au chirurgien de **vérifier la longueur de foret travaillante**.

Les butées sont amovibles, stérilisables, et disponibles pour forets courts et longs.

MARQUAGE DES BUTÉES

Par exemple C8L12 :

- Sur foret court, permet de poser un implant de longueur 8 mm (C8)
- Sur foret long, permet de poser un implant de longueur 12 mm (L12)

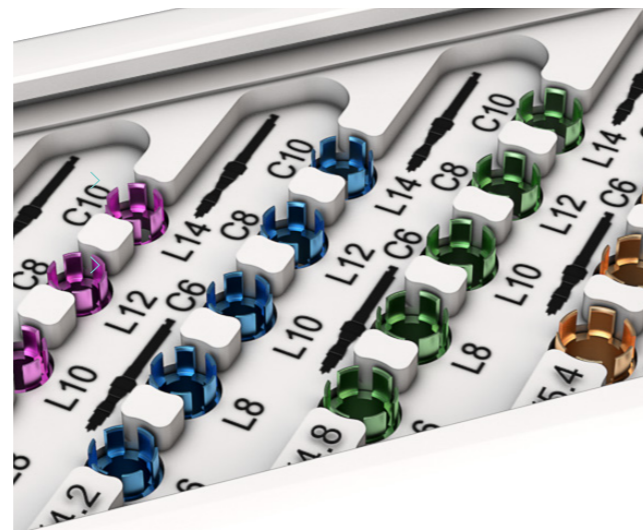

MISE EN PLACE DE LA BUTÉE

- > Butées spécifiques, clippables sur le corps des forets en prise directe avec le contre-angle.



RETRAIT DE LA BUTÉE

Un système s'adaptant à tous les diamètres de butées a été développé pour retirer les éléments du foret **sans risquer de souiller ou détériorer** les gants du praticien.

Il faut insérer le foret et la butée dans l'encoche située à droite du kit et tirer le foret vers la droite de sorte à dégager la butée.

Cette dernière, une fois retirée, se retrouve dans la loge prévue à cet effet.




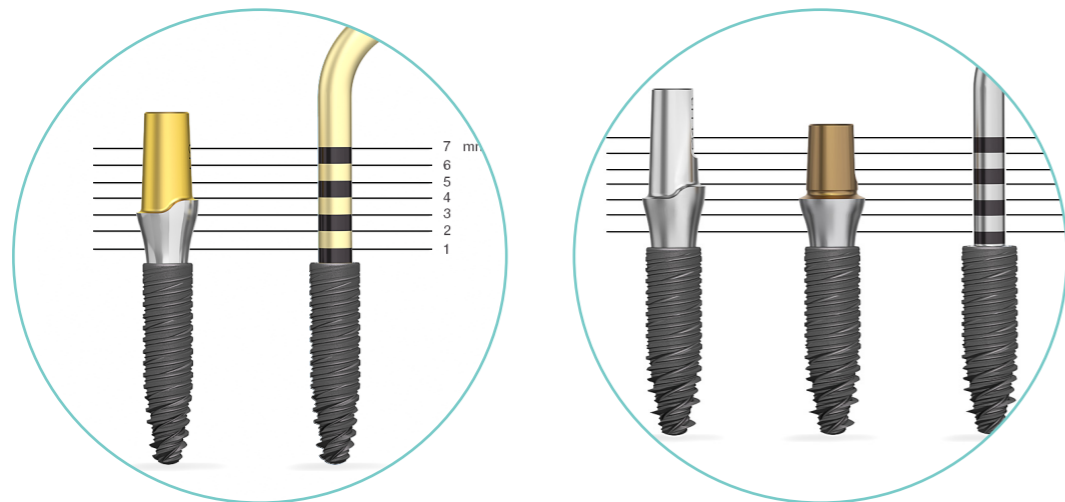
Ces kits sont stérilisables à l'autoclave.

Cycles recommandés :
(UE) 134°C - 3 min / (FR) 134°C - 18min.
Temps de séchage 20 min.
L'utilisation de chaleur sèche est proscrite.

5. Jauge de tissu parodontal

> Jauge de tissu parodontal

	Référence	Désignation
	KJTP	Jauge de tissu parodontal




Se positionne sur l'implant sans endommager la connectique.

6. Vis de cicatrisation

Hauteur gingivale



Bien nettoyer l'intérieur de l'implant avant de mettre en place la vis de cicatrisation.

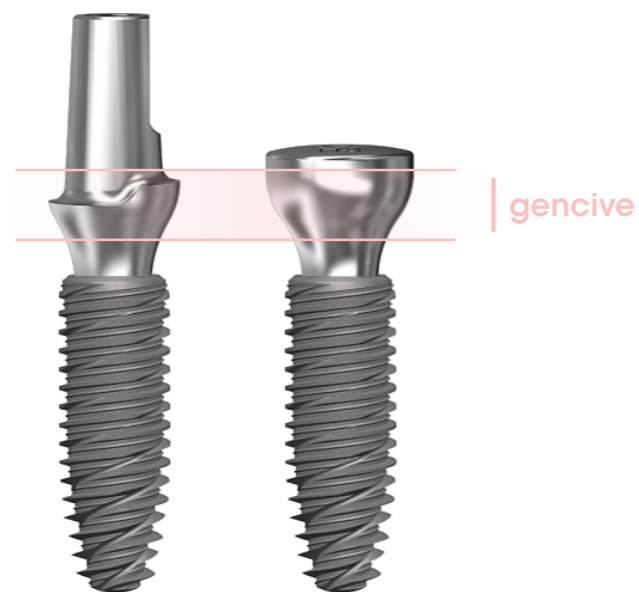


Exemple avec Ht. 3 mm

	Références	Désignations	Diamètres	Hauteurs
	K30VC	Vis de cicatrisation	Ø 3,0 mm	1,5 mm
	K30VC3			3 mm
	K30VC4			4 mm
	K30VC5			5 mm
	KVC401	Vis de cicatrisation	Ø 4,0 mm	1 mm
	KVC402			2 mm
	KVC403			3 mm
	KVC404			4 mm
	KVC405			5 mm
	KVC501	Vis de cicatrisation	Ø 5,0 mm	1 mm
	KVC502			2 mm
	KVC503			3 mm
	KVC504			4 mm
	KVC505			5 mm
	KVC652	Vis de cicatrisation	Ø 6,5 mm	2 mm
	KVC653			3 mm
	KVC654			4 mm
	KVC655			5 mm

 Prothèses spécifiques à la gamme d'implant Ø 3 mm.

> Kit de vis de cicatrisation

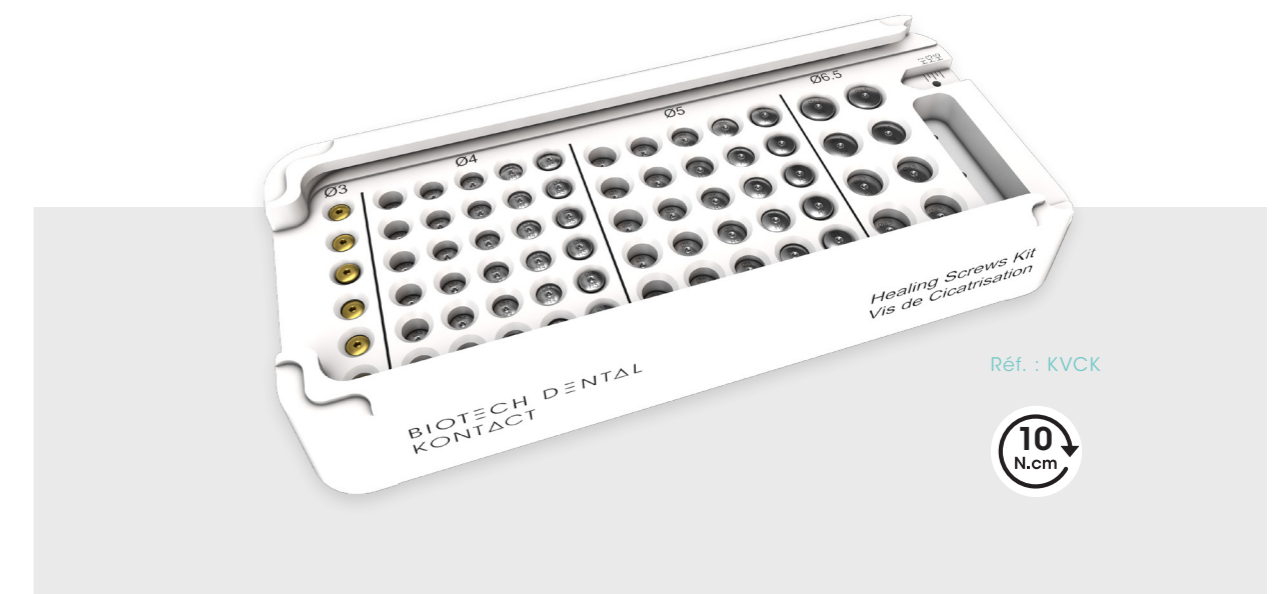

Réf. : KVCK

10
N.cm

4

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Commandes et informations :

Pour toutes vos commandes, connectez-vous sur votre espace personnel sur LaGalaxy By Biotech : www.galaxybiotech.com

Pour toute demande, notre équipe d'administration des ventes reste à votre disposition :
Tél. : +33 (0)4 86 17 60 80
service-administratif@biotech-dental.com

Horaires

8h30-17h30 du lundi au vendredi
8h30-16h30 le vendredi

Pour toute commande passée avant 16h00, nous pouvons assurer une livraison sous 48h (jours ouvrables)

Hotline prothèse

Claude Canton : Responsable activité prothèse
Tél. : +33 (0)4 86 17 60 00
E-mail : c.canton@biotech-dental.com

Formations

Pour vous informer et vous initier à notre système, le pôle formation vous propose :

- Des stages cliniques
- Des stages de prothèses
- Des journées à thème

**Pour plus d'informations sur nos formations, merci de contacter :
Biotech Dental Academy**

PARIS

36, Rue des Petits Champs
75002 Paris
Tél. : + 33 (0)6 26 30 40 46

E-mail : academy@biotech-dental.com

SALON-DE-PROVENCE

167 Imp. Gaspard Monge
13300 Salon-de-Provence

Tél. : +33 (0)6 16 75 31 74
Tél. : +33 (0)4 86 17 60 85



BIOTECH DENTAL



305, Allées de Craponne
13300 Salon-de-Provence - France

Tél. : +33 (0)4 90 44 60 60

Fax : +33 (0)4 90 44 60 61

info@biotech-dental.com

www.biotech-dental.com

www.galaxybiotech.com



AFNOR Cert. 73017

Biotech Dental - 305, Allées de Craponne - 13300 Salon-de-Provence, France.

S.A.S au capital de 24 866 417 € - RCS Salon de Provence : 795 001 304 - SIRET : 795 001 304 00018 - N° TVA : FR 31 79 500 13 04.

Dispositifs médicaux de classe I, IIa et IIb destinés à l'implantologie fabriqués par Biotech Dental. CE0477. Tous ces DM doivent être utilisés par des professionnels de santé qualifiés et formés. Lire attentivement les instructions figurant sur les notices. Non remboursés par la Sécurité Sociale. Visuels non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.

Imprimerie VALLIERE - 163, Avenue du Luxembourg - ZAC des Molières - 13140 Miramas - France.